

中国消毒行业的老品牌
欧盟CE认证 RoHS认证企业
ISO9001国际质量体系认证企业
中国消费放心推荐网“放心消费推荐产品”

Aojie[®] 奥洁

<http://www.scajxd.com>



央视CCTV形象展播·《创新中国》栏目推荐企业

四川奥洁消毒设备有限公司

SI CHUAN AO JIE XIAO DU SHE BEI YOU XIAN GONG SI

全国统一服务热线: **400-8553-556**

地址: 成都市新都高新技术园区虎桥路199号

售后服务专线: 028-86613813

网址: www.scajxd.com 邮箱: scajxd@163.com

扫描二维码



产品如因外观改变 恕不另行通知

Baidu 百度

奥洁消毒

百度一下



消毒设备系列

公司科研人员经过多年的潜心研究，研发出的不锈钢网双面放电技术生成臭氧，从根本上解决了传统管式臭氧发生器产量少，易衰减、不稳定、安全性能差、使用寿命短的缺点，是臭氧生成技术的升级换代产品。

电路部分通过专业的阻燃塑封保护处理，杜绝了因电器元件老化易引起的安全事故，延长了整机的使用寿命。

公司自行研制的程控电路，从根本上解决了高频高压作用陶瓷发生体易产生高温等多项技术难题，确保臭氧发生量保持持续稳定的状态。



Aojie® 简介

四川奥洁消毒设备有限公司是一家拥有雄厚技术力量，并致力于空气净化消毒技术研发和推广的高科技企业。公司前身系成立于1991年的成都医药职工大学消毒设备厂，是国内较早从事空气消毒和物体表面消毒设备生产的专业厂家。公司通过多年不断的积累和创新，取得了多项专利成果，同时也锻炼出了掌握国内先进技术的研发团队和具有专业技能的高素质管理团队。公司产品已通过ISO9001国际质量管理体系认证、欧盟CE认证、RoHS环保认证、中国环境保护协会CEP认证。

公司自主研发的新型“臭氧发生器”，采用具有国内先进水平的程控电路，从根本上克服了高频高压作用下陶瓷发生体易产生高温等多项技术难题，臭氧产量浓度高，使用寿命长等优点，确保臭氧发生量保持持续稳定，其专利号为：ZL 2012 2 0391330.4。公司自主研发的“等离子发生器”，采用不锈钢板冲压成型、锯齿状尖端放电技术，其专利号为：ZL 2012 2 0387643.2。

公司拥有完善的生产设备和检测设备，生产设备包括激光切割机、剪板机、折弯机及冲床等大型设备；检测设备包括德国原装进口的臭氧分析检测仪、美国原装进口的负离子浓度检测仪、紫外线强度检测仪、尘埃粒子检测仪、风速测试仪、噪音测试仪、高压测试仪、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪以及接地电阻测试仪等。

公司一贯秉承“求真务实，开拓创新”的管理理念，为广大客户提供“高品质、高服务、低价格”优质产品。热忱欢迎广大新老客户来函来电垂询！



床单位臭氧消毒机

HIGHLY EFFICIENT BED-UNIT STERILIZER WITH OZONE

——床单位消毒的革命

奥洁·与你共创无菌世界
AOJIE Generate A world of Asepsis

03/04

床单位臭氧消毒机

■ 床单位臭氧消毒机

产品简介:

AJ/CDX-600型系列床单位臭氧消毒机采用高浓度臭氧发生装置及气泵增压技术，将高浓度臭氧以半封闭增压渗透方式输入包裹于专用床罩里的被褥、枕芯、床垫中，达到为床单位消毒的目的，将致病微生物杀灭于“温床”之中。



技术指标:

- 输入功率: ≤240W
- 工作电压: 198~242V/50Hz
- 臭氧产生量: 5g/h
- 噪音: 55dB
- 净重: 26kg
- 消毒时间: 20~40min
- 臭氧输气管长度: 2.0m
- 消毒床罩尺寸: 1800×2800mm
- 外观尺寸: 420mm×480mm×1020mm

临床用途:

床单位臭氧消毒机是控制交叉感染，切断感染途径的必要消毒手段。

■ 广泛用于: 医院、宾馆以及其它场所;

■ 应用范围: 被褥、枕芯、床垫、毛毯等;

■ 其它消毒: 可用于器械、餐具、工作服、果蔬等物体表面的消毒。



检测结果:

按消毒技术规范检测结果

代表菌种	代表类型	杀灭率	杀灭对数值
杆菌类	大肠杆菌	99.9%	≥3.0
球菌类	金黄色葡萄球菌	99.9%	≥3.0
真菌类	白色念珠球菌	99.9%	≥3.0

05/06

标准款A₁性能特点:

- 采用新一代臭氧技术——不锈钢陶瓷管臭氧发生器，产气量稳定;
- 使用寿命长;
- 气量可调，适用于各种床单位消毒;
- 可利用左右通道同时处理相邻两张病床;
- 微电脑操作，噪音低，对周围环境无影响;
- 消毒时间数码直观显示，时间可任意选择设定;
- 内置隐藏式配件箱，具有配件防丢失功能;

加强版A₂性能特点:

- 采用新一代臭氧技术——不锈钢陶瓷管臭氧发生器，产气量稳定;
- 使用寿命长;
- 气量可调，适用于各种床单位消毒;
- 可利用左右通道同时处理相邻两张病床;
- 微电脑操作，噪音低，对周围环境无影响;
- 消毒时间数码直观显示，时间可任意选择;
- 具有抽真空功能，能使臭氧迅速渗透至被褥内部，消毒彻底，无死角;
- 消毒结束后进行臭氧解析，无残留，安全可靠;
- 内置隐藏式配件箱，具有配件防丢失功能。

豪华款A₄性能特点:

- 5.4英寸大屏幕中文背光液晶显示，操作直观、方便。
- 微电脑控制，一键启动，只需一个按键，就可自动完成“抽真空-消毒-保持-解析”四大功能，方便快捷。
- 具有臭氧发生器故障报警提示功能;
- 具有抽真空功能，能使臭氧迅速渗透至被褥内部，消毒彻底，无死角。
- 消毒结束后进行臭氧解析，无残留，安全可靠。
- 自带时钟显示功能，消毒时间可根据需要设定并自动累计。
- 具有触摸和红外线遥控操作两套系统;
- 内置隐藏式配件箱，具有配件及遥控器防丢失功能。



等离子空气净化消毒机

奥洁.与你共创无菌世界



07/08

等离子空气净化消毒机

■ 等离子空气净化消毒机 ■ ■ ■

产品简介

我公司生产的等离子空气净化消毒机，是我公司自主研发的，具备完全自主知识产权的专利产品，专利号为：ZL 2012 2 0387643.2。采用等离子体杀菌、初中高效过滤除尘，从而改变室内空气结构，做到人机同室，为广大用户提供健康安全、清新的室内工作和生活环境。



平板式

工作原理

1. 室内空气经过初中效过滤器可以去除空气中较大的尘埃颗粒，再经过活性炭过滤器去除空气中各种异味气体。

2. 等离子发生器是一种特殊高压正负离子发生器，正离子发生是靠锯齿状正电极不断的产生高能量、高浓度的正离子，我们需要用正离子来杀菌，根据室内体积大小来决定需要多少正离子。高浓度正离子使空气中的细菌和可吸入颗粒物（包含阴霾PM2.5）处于正离子极度包围之中，使其迅速获得饱和电量。平板状正电极具有很高的静电场强度（8千伏高压），带电的微粒与细菌会迅速吸附到正电极板上，正电极装置充满正离子。细菌在正离子浸润作用下会迅速发生电解，细菌电解质被破坏、细胞膜被破坏从而导致死亡。等离子发生器同时还能通过1万五千伏高压电场产生高浓度负离子。当正负离子同时存在时，正离子和负离子发生电荷中和，在中和的过程中更能有效地杀灭空气中各种细菌。同时我们还需要负离子，因此在设计的过程中，有意设计负离子浓度2倍于正离子浓度，正负离子电荷中和后还剩余一半负离子。负离子被空气中的氧俘获变成负氧离子，负氧离子主要具有杀菌、消烟、除尘、除异味、除甲醛等功效，从而改善空气质量。由于负氧离子能使各种微粒、飘尘、电荷聚集，并能将有害气体分解，杀灭细菌与病毒，消除烟雾异味，从而达到改变空气结构，净化、消毒室内空气之目的。

机型	款式	显示方式	适用体积 (m³)	功率 (W)	外形尺寸 (mm)
I A	平板式	数显	60	≤100	980×395×175
		液晶	60	≤100	980×395×175
数显		100	≤125	980×395×175	
液晶		100	≤125	980×395×175	

09/10

■ 等离子空气净化消毒机 ■ ■ ■

数码显示款综合特点：

- 触摸、遥控、程控三种控制方式，操作更方便；
- 智能程控控制运行，附带临时消毒功能；
- 程控停电保护装置，通电自动复位，操作简便省心，
- 具有断电保护，停电保护功能；
- 初中效及活性炭过滤空气；
- 大风量循环风，等离子体消毒杀菌无死角，迅速彻底杀灭致病菌；
- 高浓度负离子清新空气；
- 消毒时间数码直观显示，时间任意设置；
- 整机工作寿命自动计时；



移动式

机型	款式	显示方式	适用体积 (m³)	功率 (W)	外形尺寸 (mm)
I B	移动式	数显	60	≤100	530×420×850
		液晶	60	≤100	530×420×850
数显		100	≤125	530×420×850	
液晶		100	≤125	530×420×850	

液晶豪华款综合特点

- 微电脑程序控制，触摸式控制面板，中文背光液晶显示屏；
- 遥控、程控、手控多种操作方式；
- 具有电机、负离子故障自动报警及真人语音提示功能；
- 大风量循环风，等离子体消毒杀菌无死角，迅速彻底杀灭致病菌；
- 过滤网清洗自动报警提示；
- 整机工作寿命自动计时；
- 高浓度负离子清新空气；
- 遥控器具有防丢失功能。



平板柜式

机型	款式	显示方式	适用体积 (m³)	功率 (W)	外形尺寸 (mm)
II B	柜式	数显	150	≤200	480×280×1720
		液晶	150	≤200	480×280×1720
	平板柜式	液晶	150	≤200	650×265×1785

■ 等离子空气净化消毒机

产品简介:

等离子空气净化消毒机是采用我公司自主研发的专利等离子发生器，并采用HEPA高效过滤器，使大于0.3μm的尘埃和附着在尘埃上的细菌被高效过滤器吸附、滤除、阻断、阻隔，从而获得局部百级和整体房间1万级的净化空间，是专为手术室、ICU、血透室及无菌净化环境研制生产的空气净化消毒设备。

综合特点:

- 微电脑程序控制;
- 中文背光液晶显示屏;
- 遥控、程控多种操作方式;
- HEPA高效层流过滤尘埃及微生物;
- 风机、电机、负离子故障自动报警;
- 过滤网清洗自动报警提示;
- 整机工作寿命自动计时;
- 遥控器具有防丢失功能;
- 高浓度负离子清新室内空气;

吸顶式



机型	显示方式	款式	适用体积(m ³)	初中效过滤	高效过滤(HEPA)	功率(w)
I C	液晶	吸顶式	60	+	+	≤100
II C		吸顶式	150	+	+	≤100
III C		吸顶式	100	+	+	≤125

■ 等离子空气净化消毒机 (洁净屏)

产品简介:

等离子空气净化消毒机是采用我公司自主研发的专利等离子发生器，并采用HEPA高效过滤器，使大于0.3μm的尘埃和附着在尘埃上的细菌被高效过滤器吸附、滤除、阻断、阻隔，从而获得局部百级和整体房间1万级的净化空间，是专为手术室、ICU、血透室及无菌净化环境研制生产的空气净化消毒设备。

综合特点:

- 微电脑程序控制，触摸式操作面板;
- 中文背光液晶显示屏;
- 遥控、程控、手控多种控制方式;
- HEPA高效层流过滤尘埃及微生物;
- 风机、电机、负离子故障自动报警;
- 过滤网清洗自动报警提示;
- 整机工作寿命自动计时;
- 遥控器具有防丢失功能;
- 高浓度负离子清新室内空气;

推车式



机型	款式	显示方式	适用体积(m ³)	活性炭过滤	高效过滤(HEPA)	功率(w)
III C+	洁净屏	液晶	100	+	+	≤125



紫外线空气消毒器

奥洁牌AJ/YXD系列紫外线空气消毒器是依照卫生部《消毒技术规范》要求，采用室内循环风方式。通过多种的物理过滤手段，配合高强度C波段紫外线装置，在迅速过滤掉室内空气中的尘埃粒子的同时，直接杀灭细菌、病毒，切断疾病的空气传播途径，减少室内空气污染，改善空气质量。是专门为**人机共处**环境研制设计的，其性能安全可靠，既能消毒达标，又对人体无害，被称为现代“绿色消毒产品”，标志着空气消毒进入了一种全新的时代。

紫外线空气消毒器

■ 平板式紫外线空气消毒器

性能特点

- 初、中效过滤空气。
- 活性炭除臭及光触媒除菌辅助消毒手段。
- 负离子清新净化空气。
- 微电脑程序控制，触感式控面板，中文背光液晶显示屏。
- 遥控、程控、手控多种操作方式。
- 紫外管、风机、电机、负离子故障自动报警。
- 主管失效备用管自动启动及加强功能。



平板式

- 风速高、中、低档可调。
- 紫外线强度自动显示。
- 过滤网清洗自动报警提示。
- 整机工作寿命自动计时。
- 遥控器具有防丢失功能。

机 型	显示方式	适用体积 (m³)	初中效过滤	光触媒网	活性炭网	遥控	程控	触摸	功率 (W)	外观尺寸 (mm)
平板式	数显	60	+	+	+	+	+	+	150	980×395×175
平板式	液晶	60	+	+	+	+	+	+	150	980×395×175
平板式	数显	100	+	+	+	+	+	+	220	980×395×175
平板式	液晶	100	+	+	+	+	+	+	220	980×395×175

■ 壁挂式紫外线空气消毒器

综合特点:

- 采用红外线遥控操作，方便使用。
- 智能程控控制运行，附带临时消毒功能。
- 程控停电保护装置，通电自动复位，操作简便省心。
- 具有断电保护，停电保护功能。
- 大风量循环风，紫外线杀菌消毒无死角，迅速彻底杀灭致病菌。
- 负离子清新净化空气。
- 消毒时间数码直观显示、时间任意设置。



壁挂式

机 型	适用体积 (m³)	初中效过滤	光触媒网	活性炭网	遥控	程控	数显	功率 (W)	外观尺寸 (mm)
壁挂式	60	+	+	+	+	+	+	150	1010×325×215
壁挂式	100	+	+	+	+	+	+	220	1010×325×215

■ 移动式紫外线空气消毒器

综合特点:

- 触摸、遥控、程控三种控制方式。
- 智能触摸控制运行，附带临时消毒功能。
- 停电保护装置，停电自动复位，操作简便省心。
- 具有断电保护，停电保护功能。
- 大风量循环风，紫外线杀菌消毒无死角，迅速彻底杀灭致病菌。
- 高压静电吸附除尘杀菌（选配）。
- 集高压静电吸附除尘、紫外线杀菌、分解除异味等多种物理手段处理空气。
- 负离子发生装置清新净化空气。
- 消毒时间数码直观显示，时间任意设置。



移动式

机 型	显示方式	适用体积 (m³)	初中效过滤	光触媒网	活性炭网	遥控	程控	触摸	功率 (W)	外观尺寸 (mm)
移动式	数显	60	+	+	+	+	+	+	150	530×420×850
移动式	液晶	60	+	+	+	+	+	+	150	530×420×850
移动式	数显	100	+	+	+	+	+	+	220	530×420×850
移动式	液晶	100	+	+	+	+	+	+	220	530×420×850

■ 柜式紫外线空气消毒器

综合特点:

- 触摸、遥控、程控三种控制方式。
- 智能程控控制运行，附带临时消毒功能。
- 程控停电保护装置，通电自动复位，操作简便省心。
- 具有断电保护，停电保护功能。
- 大风量循环风，紫外线杀菌消毒无死角，迅速彻底杀灭致病菌。
- 高压静电吸附除尘杀菌（选配）。
- 高压静电吸附除尘、紫外线杀菌、分解除异味等多种物理手段处理空气。
- 负离子清新净化空气。
- 消毒时间数码直观显示，时间任意设置。



柜式

机 型	显示方式	适用体积 (m³)	初中效过滤	光触媒网	活性炭网	遥控	程控	触摸	功率 (W)	外观尺寸 (mm)
柜式	数显	150	+	+	+	+	+	+	350	490×305×1700
柜式	液晶	150	+	+	+	+	+	+	350	490×305×1700
平板柜式	液晶	150	+	+	+	+	+	+	350	650×265×1785

臭氧消毒机

■ 壁挂式臭氧消毒机

综合特点:

- 臭氧消毒属主动消毒手段，广谱杀菌，无死角，消毒后自动还原为氧。
- 在无人环境自动运行，红外线遥控及程控两种控制方式，附带临时消毒功能。
- 采用我公司自主研发具有完全自主知识产权的专利技术生成臭氧，其专利号：ZL 201220391330.4。
- 新型石英臭氧片，臭氧产量稳定，使用寿命长。
- 臭氧发生器体积小，维修便捷。
- 消毒不需要其他辅助材料，只需要空气和220V电源，不造成环境污染，属绿色环保产品。
- 停电保护装置，停电自动复位。操作简便省心。
- 外壳采用全不锈钢精制而成，具有防腐作用。



壁挂式

机 型	适用体积 (m³)	臭氧浓度 (mg/m³)	初中效过滤	遥控	程控	臭氧加强	功率 (w)	外观尺寸 (mm)
壁挂式	80	≥20	+	+	+	+	105	1010×215×325
壁挂式	150	≥20	+	+	+	+	150	1010×215×325

适用范围:



医院、食品厂、学校、幼儿园、娱乐场所、银行、商场、生产车间、档案馆、图书馆、茶楼、实验室等。

■ 移动式臭氧消毒机

综合特点:

- 全不锈钢外壳，具有防腐作用。
- 触摸、遥控、程控三种控制方式，使用方便。
- 采用我公司自主研发具有完全自主知识产权的专利技术生成臭氧。
- 新型石英臭氧片，臭氧产量稳定，使用寿命长。
- 臭氧发生器体积小，维修方便。



移动式

机 型	适用体积 (m³)	臭氧浓度 (mg/m³)	初中效过滤	触摸	遥控	程控	臭氧加强	功率 (w)	外观尺寸 (mm)
移动式	80	≥20	+	+	+	+	+	105	320×200×680
移动式	150	≥20	+	+	+	+	+	150	320×200×680

■ 柜式臭氧消毒机

综合特点:

- 本机壳体选用全金属外壳精制而成，新颖时尚。触摸，程控、遥控三种控制方式，使用更方便。
- 采用我公司自主研发具有完全自主知识产权的专利技术生成臭氧。
- 新型石英臭氧片，臭氧产量稳定，使用寿命长。
- 臭氧发生器体积小，维修方便。

机 型	适用体积 (m³)	臭氧浓度 (mg/m³)	初中效过滤	触摸	遥控	程控	臭氧加强	功率 (w)	外观尺寸 (mm)
柜式	150	≥20	+	+	+	+	+	150	480×280×1720




柜式

动静两用空气消毒机

■ 平板式动静两用空气消毒机

综合特点:

- 动静两用平板挂机，是一款性价比十分优越的机型，外形简洁，易于安装，具有工作稳定，整机使用寿命长特点。
- 操控方便，配有红外线遥控，程控控制消毒功能（臭氧分段定时自动工作）。
- 程控停电保护装置，通电自动复位，操作简便省心。
- 采用臭氧消毒和紫外线杀菌两种方式。
- 消毒时间数码直观显示，时间自行设置。

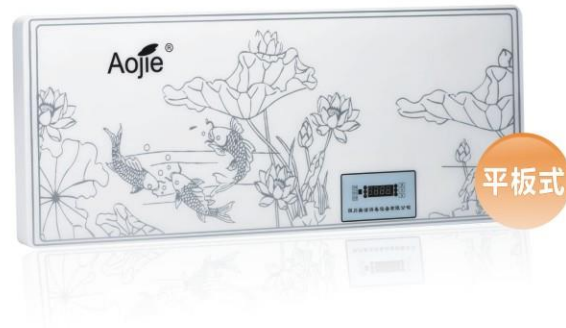

机 型	适用体积 (m³)	臭氧浓度 (mg/m³)	初中效过滤	活性炭网	遥控	程控	数显	功率 ≤(W)	外观尺寸 (mm)
平板式	100	≥20	+	+	+	+	+	220	980×395×175

性能特点

- 附带临时消毒功能。
- 综合利用多种消毒手段。
- 可程控和临时消毒控制。
- 可在无人或有人环境下消毒杀菌，自行选择。
- 程控自动运行，可远距离遥控启动。
- 适合各种场所的空气消毒。



综合消毒手段

- 臭氧静态消毒
- 高强紫外线动态杀菌
- 采用初中效过滤空气

■ 移动式动静两用空气消毒机

综合特点:

- 外观别致，线条流畅，移动方便，不占用空间。
- 综合消毒手段，臭氧和超强紫外线结合消毒杀菌。
- 触摸、程控及遥控三种控制方式，操作更方便。
- 程控停电保护装置，通电自动复位，操作简便省心。
- 消毒时间数码直观显示，时间自行设置。



机 型	适用体积 (m³)	臭氧浓度 (mg/m³)	初中效过滤	活性炭网	触摸	遥控	程控	数显	功率 ≤(W)	外观尺寸 (mm)
移动式	100	≥20	+	+	+	+	+	+	220	440×360×880

■ 柜式动静两用空气消毒机

综合特点:

- 壳体采用全金属外壳精制而成，大循环风量消毒杀菌。
- 触摸、程控及遥控三种控制方式、操作方便。
- 高强紫外线、紫外线灯管寿命长。
- 集除尘、臭氧消毒、紫外线杀菌除异味等多种物理手段处理净化空气。
- 消毒时间数码直观显示，时间自行设置。



机 型	适用体积 (m³)	臭氧浓度 (mg/m³)	初中效过滤	活性炭网	触摸	遥控	程控	数显	功率 ≤(W)	外观尺寸 (mm)
柜式	100	≥20	+	+	+	+	+	+	220	480×280×1720

空气净化器

D4



产品简介

我公司生产的空气净化器，是我公司自主研发的具备完全自主知识产权的高科技产品，并获得国家专利，专利号为：ZL 2012 2 0387643.2。采用多重过滤网净化空气、等离子体杀菌、同时释放高浓度负离子净化空气，从而改变室内空气结构，做到人机同室，为广大用户提供健康安全、清新的室内工作和生活环境。

适应范围

该产品广泛适用于各种医院、血站、办公场所，写字楼、宾馆、商场、学校、食品厂、茶楼、酒吧及家庭等各种需要空气净化的场所。

工作原理

- 1、室内空气经过初中效过滤可以去除空气中较大的尘埃颗粒；再经过HEPA过滤网（高效过滤器）可以有效去除空气中细小的灰尘及烟气，同时具有抗菌防霉等功效；再经过多元触媒过滤网（甲醛过滤网）及活性炭过滤网可以有效去除甲醛、各种异味等有害气体。
- 2、等离子发生器是一种特殊高压正负离子发生器，正离子发生是靠锯齿状正电极不断的产生高能量、高浓度的正离子，我们需要用正离子来杀菌。高浓度正离子使空气中的细菌和可吸入颗粒物处于正离子极度包围之中，使其迅速获得饱和电量。等离子发生器同时还能通过1万五千伏高压电场产生高浓度负离子，每平方厘米高达4千万个。负离子被空气中的氧俘获变成负氧离子，负氧离子主要具有杀菌、消烟、除尘、除异味、除甲醛等功效，从而改善室内空气质量；除此之外，负氧离子还具有镇静、催眠、增加人体肺活量、扩张血管、降低血压之功效。
- 3、可选配置我公司定制的负离子测试笔可以让你随时检测负离子运行状态。

C5



引进美国GE粉尘传感器



21/22

空气净化器

多重滤网多级净化

- 1、前置初效过滤层，可除去皮屑、毛发、尘土等较大颗粒物，并且可反复清洗使用，减少用户使用成本。
- 2、高效HEPA过滤层，有效过滤空气中的过敏源，如花粉、螨尘、烟尘、霉菌孢子、纺织纤维等细微颗粒。实际针对国家标准PM2.5净化率可达99%，最小可净化0.3 μm以上的颗粒物。
- 3、抗菌隔离过滤层，能有效去除与隔离HEPA滤网因长期使用未及时清理与更换滤网所产生的细菌滋生物。
- 4、活性炭过滤层，有效吸附空气中的甲醛、苯、二甲苯、TVOC，去除香烟、垃圾等异味。
- 5、分子筛吸附层，分子筛吸附是一种物理现象，对气体纯化主要靠吸附和交换作用，分子筛孔隙率非常高，内表面积很大，内空占体积的50%左右，经高温活化沸石失水后，晶体内部形成许多孔径大小均匀的孔径，具有很强的吸附能力，能有效地把直径小于其孔径的气体分子及水分吸时孔内，而把大于孔径的分子挡在孔外，从而延长活性炭使用寿命，为用户节省成本。
- 6、冷触媒过滤层，作用功能有：（1）抗菌性，杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、绿脓杆菌、病毒等。（2）空气净化，有效分解空气中有机化合物及有毒害物质（如：苯、氨、TOVC等）。
- 7、紫外线杀菌过滤层，利用适当波长的紫外线能够破坏微生物机体中的DNA（脱氧核糖核酸）或RND（核糖核酸）的分子结构造成生长性细胞死亡，达到杀菌消毒的效果。
- 8、负离子过滤层，负离子具有杀菌降尘功能，也被医学界誉为“空气中的维生素”，使室内具有瀑布、森林般的负离子群，促进人体新陈代谢，提高免疫力。

C6



主要技术指标

- 1、医用等离子技术除尘、杀菌，大屏幕液晶数字显示；
- 2、采用进口精密粉尘传感器，实时检测当前室内环境的PM2.5浓度值，能做到对空气质量好坏程度一目了然；
- 3、颗粒物洁净空气量CADR值：428m³/h；
- 4、甲醛污染物洁净空气量CADR值：64.4m³/h；
- 5、颗粒物洁净空气量CCM值：12421mg；
- 6、净化级别：P4高效级；
- 7、输入电源：220V/50Hz；
- 8、输入功率：55W；

机型	适用面积	初中效过滤	HEPA 高效过滤	活性炭过滤	等离子技术	紫外线杀菌	实时监测PM2.5值	外形尺寸 (mm)
D3	25m²		√	√	√		√	329×205×569
D4	25m²		√	√	√	√	√	329×205×569
C5	30m²	√	√	√	√	√	√	391×245×603
C6	30m²	√	√	√		√	√	480×180×455

■ 静电式油烟净化器 ■ ■ ■

工作原理

奥洁牌AJ-JD系列静电式油烟净化器，是本公司根据国家环保总局的有关规定及要求研发生产的，采用本公司的专利技术，能有效去除油烟，清除异味，从而净化作业环境达到国家环保要求，彻底解决油烟排放污染空气等问题。

适用范围

油烟净化器为去除厨房油烟的专用设备，主要用于宾馆、饭店、餐馆等餐饮业油烟净化；学校、医院、食品加工厂、工矿企业事业单位食堂等油烟净化。

产品特点

- 1、采用高压静电场去除油烟，净化效率高，还具有消除异味等功能。
- 2、合理的结构设计，根据流体力学的原理，对净化器主题进行了优化设计，大大降低了产品的风阻和噪声。
- 3、净化模块单元采用分体抽屉式设计，易于安装、维护、方便清洁。
- 4、电源控制系统具有过流过压自动保护报警装置，保证设备安全运行。
- 5、专利高压电源具有使用寿命长，性能稳定等优点。

产品图片



4A



24A

23/24

参数指标

- 1、输入电压：AC220V/50HZ
- 2、净化率：97%
- 3、本体阻力：<150Pa；接地阻力：<2Ω
- 4、电场绝缘电阻：>50MΩ

技术规格

型号规格	处理风量(m³/h)	外型尺寸(mm)	进出风口(mm)	净化率(%)	风阻(Pa)	额定功率(W)
AJ-JD-4A	4000	700×720×695	407×497	90	<150	400
AJ-JD-6A	6000	700×820×810	507×607	90	<150	500
AJ-JD-8A	8000	700×890×870	577×667	90	<150	800
AJ-JD-12A	12000	1207×820×810	507×607	97	<150	1000
AJ-JD-16A	16000	1207×890×870	580×670	97	<150	1600
AJ-JD-20A	20000	1095×730×1307	450×1107	97	<150	1800
AJ-JD-24A	24000	1207×820×1500	510×1300	97	<150	2000
AJ-JD-32A	32000	1207×900×1650	580×1440	97	<150	3200

■ 光解复合式油烟净化器 ■ ■ ■

产品特点

- 1、奥洁牌AJ-FH系列光解复合式油烟净化器采用UV光解和高压静电复合式的方式，净化效率更高，同时还具有去除各种异味等功能。
- 2、合理的结构设计，根据流体力学的原理，大大降低了产品的风阻和噪声。
- 3、专利高压电源具有使用寿命长，性能稳定等优点，净化模块采用分体抽屉式设计，易于安装、维护、保养。
- 4、电源控制系统具有过滤过压自动保护报警装置，保证设备安全运行。
- 5、开门自动断电，更加人性化设计，使用更加安全可靠。
- 6、红外线遥控操作，方便又省心，做到需要时开关，可大大节约电费，单片机程序自动控制，可以做到在无人状态自动开关机。

产品图片



4A



24A

■ 果蔬净化消毒机

产品型号：AX01

01

产品参数

产品名称：多功能果蔬解毒机	面板材质：钢化玻璃
产品型号：AX01	是否触控：是
产品颜色：香槟金	额定功率：15w
是否可挂墙：是	包装尺寸：360×250×75mm
用途：空气净化及消毒	产品尺寸：300×210×50mm
活氧产出工作时间：1-30min/次	活氧产量：300mg/h



■ 果蔬净化机（活氧）

产品型号：AX03

03

产品参数

产品型号：AX03	产品尺寸：342×351×326mm
产品重量：3.8kg	额定电压：220~
额定频率：50Hz	额定功率：30w



■ 果蔬净化机（活氧）

产品型号：AX02

02

活氧净化 | 气泡清洗 | 全物理净化
分解农药残留 | 无需化学剂清洗



■ 等离子果蔬净化机

产品型号：AX04

04

产品参数

产品型号：AX04	产品尺寸：330×425×320mm
产品重量：4.8kg	额定电压：220~
额定频率：50Hz	额定功率：45w



■ 果蔬净化机（羟基离子）

产品型号：AX05

05

产品参数

产品型号：AX05	产品尺寸：360×413×352mm
产品重量：8.5kg	额定电压：220~
额定频率：50Hz	额定功率：100w



中国消毒行业的老品牌
欧盟CE认证 RoHS认证企业
ISO9001国际质量体系认证企业
中国消费放心推荐网“放心消费推荐产品”

Aojie[®] 奥洁

<http://www.scajxd.com>



央视CCTV形象展播·《创新中国》栏目推荐企业

四川奥洁消毒设备有限公司

SI CHUAN AO JIE XIAO DU SHE BEI YOU XIAN GONG SI

全国统一服务热线: **400-8553-556**

地址: 成都市新都高新技术园区虎桥路199号

售后服务专线: 028-86613813

网址: www.scajxd.com 邮箱: scajxd@163.com

扫描二维码



产品如因外观改变 恕不另行通知

Baidu 百度

奥洁消毒

百度一下